



## TREIBERDEINSTALLATION:

### Entfernen des Treibers auf Windows XP:

Wenn Sie über Windows XP verfügen, können Sie den Treiber mithilfe des Programms „DriverUninstallXP.exe“ von ihrem PC entfernen:

1. Speichern Sie sich dieses auf Ihrem PC
2. Starten Sie die Deinstallation mit einem Doppelklick.
3. Klicken Sie im Programmfenster auf „Uninstall driver“ und bestätigen Sie den Vorgang anschließend mit „Ja“. Der Treiber ist nun deinstalliert.

Wenn Sie Windows 2000 installiert haben, folgen Sie bitte den Punkten im folgenden Absatz.

### Manuelles Entfernen des Treibers auf Windows 2000 und XP:

1. Schließen Sie die Pulsuhr an den PC an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche „Arbeitsplatz“ auf Ihrem Desktop und wählen Sie den Punkt „Verwalten“.
3. Klicken Sie im linken Bereich des Fensters auf „Gerätemanager“
4. Öffnen Sie anschließend mit einem Doppelklick den Bereich „USB-Controller“ im rechten Bereich des Fensters.
5. Wenn eine vorhergehende Installation nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, finden Sie hier den Punkt „USB Bridge“, markiert mit einem gelben Ausrufezeichen. Alternativ kann die USB Bridge auch unter dem Punkt „Andere Geräte“ zu finden sein.
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „USB Bridge“ und wählen rechts „Deinstallieren“
7. Bestätigen Sie den Vorgang abschließend mit „Ok“. Der Treiber ist nun deinstalliert.