

- i** UM EINE FEHLERFREIE DATENÜBERTRAGUNG ZU GEWÄHRLEISTEN, BEFOLGEN SIE DIE NACHFOLGENDEN HANDLUNGSSCHRITTE

1 Computer starten

- Starten Sie Ihren Computer. Achten Sie darauf, dass das Blutdruckmessgerät nicht mit dem Computer verbunden ist.

2 „Beurer HealthManager“ starten

- Starten Sie das Programm „Beurer HealthManager“ auf Ihrem Computer. Wenn Sie den „Beurer HealthManager“ noch nicht installiert haben, folgen Sie den Anweisungen im FAQ „Installation des Beurer HealthManagers“.

3 Gerät auswählen

- Klicken Sie im Startbildschirm auf „Blutdruck“.




4 Gerät mit Computer verbinden

- Verbinden Sie das Blutdruckmessgerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.



5

- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den „Datentransfer“-Button (im Bild rot eingekreist).

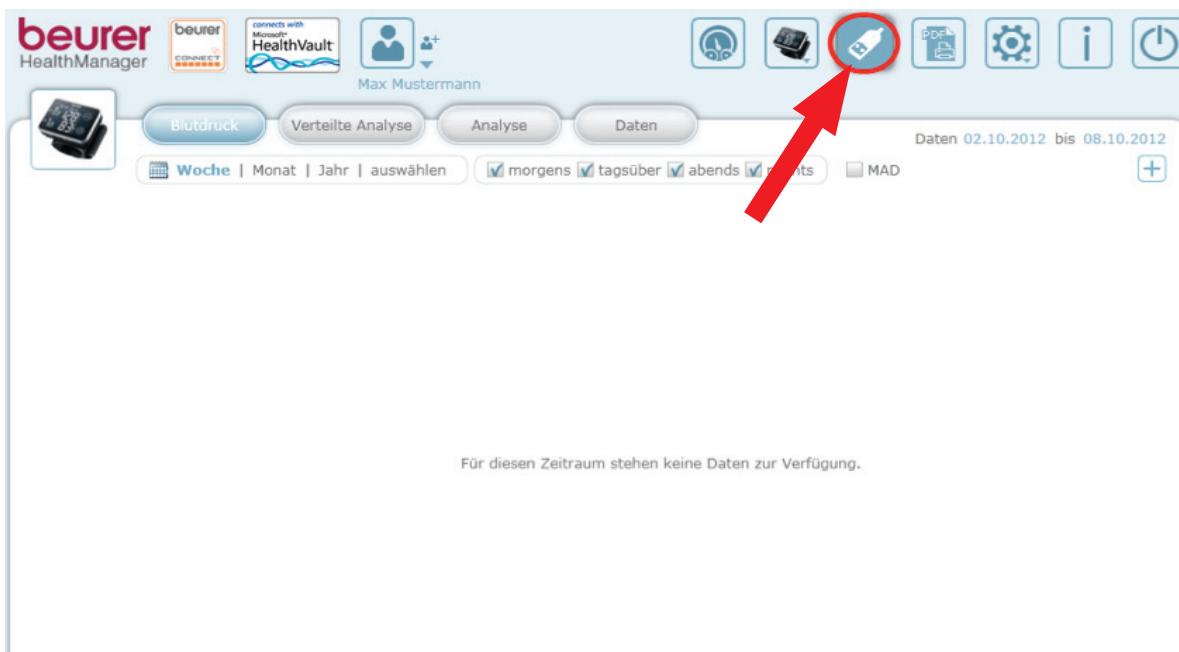

- Klicken Sie im erscheinenden Dialogfenster „Geräte auswählen“ auf das Bild Ihres Blutdruckmessgeräts (im Bild rot eingekreist).



6

- Achten Sie darauf, dass auf der Unterseite des Blutdruckmessgeräts der Touch Screen-Aktivierungsschalter auf „ON“ eingestellt ist (im Bild rot eingekreist).



7

1. Drücken Sie zuerst auf die „MEM“-Taste, auf dem Display erscheint **U1**.
2. Wählen Sie anschließend mit der „START/STOP (⏻)“-Taste Ihren gewünschten Benutzerspeicher, den Sie auf den Computer übertragen möchten (z.B. **U1** oder **U2**).



8


Nachdem Sie Ihren gewünschten Benutzerspeicher ausgewählt haben (z.B. U1 oder U2), warten Sie ca. 5 Sekunden bis im Display automatisch die zugehörigen Messwertzahlen erscheinen.

i Erst wenn im Display die zugehörigen Messwertzahlen erscheinen, können Sie mit dem nächsten Handlungsschritt fortfahren.



9

• Klicken Sie in der Software innerhalb von 30 Sekunden auf den „Ja“-Button.

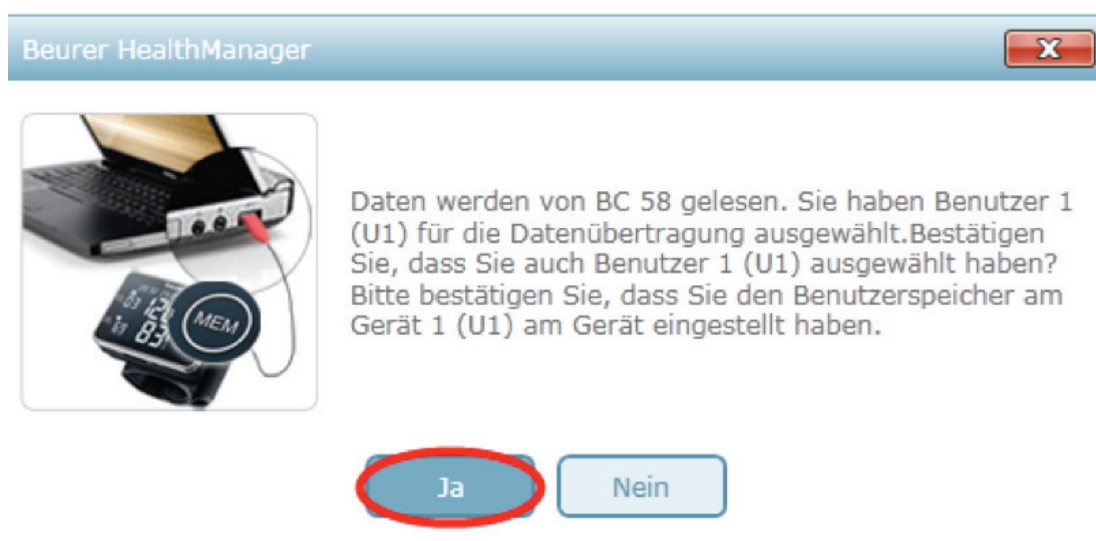

10

- Warten Sie bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.



11

- Um die Datenübertragung erfolgreich abzuschließen, klicken Sie auf den „Ok“-Button.



12

- Um die übertragenen Messungen auf Ihrem Computer zu speichern, drücken Sie auf den „Speichern“-Button.

