

### **i** Hinweis

UM EINE FEHLERFREIE DATENÜBERTRAGUNG ZU GEWÄHRLEISTEN, BEFOLGEN SIE DIE NACHFOLGENDEN HANDLUNGSSCHRITTE.

---

### **1** PC starten

Starten Sie Ihren Computer. Achten Sie darauf, dass das Blutdruckgerät nicht mit Ihrem Computer verbunden ist.

---

### **2** „Beurer HealthManager“ starten

Starten Sie das Programm „Beurer HealthManager“ auf Ihrem Computer.  
(Wenn Sie den „Beurer HealthManager“ noch nicht installiert haben, folgen Sie den Anweisungen im Kapitel „Installation des Beurer HealthManagers“.)

---

### **3** Gerät auswählen

Klicken Sie im Startbildschirm auf „Blutdruck“.



### **4** Gerät mit PC verbinden

Verbinden Sie das Blutdruckmessgerät über das mitgelieferte USB\_Kabel mit Ihrem Computer.

---

5

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den „Datentransfer“-Button (im Bild rot eingekreist).



6

Klicken Sie im erscheinenden Dialogfenster „Geräte auswählen“ auf das Bild Ihres Blutdruckmessgeräts (im Bild rot eingekreist).



7

Drücken Sie am Blutdruckmessgerät die „M“-Taste. Drücken Sie zuerst auf die „M“-Taste. Auf dem Display erscheint **U1**.

Wählen Sie anschließend mit der „START/STOP (ⓘ)“-Taste Ihren gewünschten Benutzerspeicher, den Sie auf den Computer übertragen möchten (z.B. **U1** oder **U2**).


8

Warten Sie bis im Display die Durchschnittswerte erscheinen.



9

Klicken Sie in der Software innerhalb von 30 Sekunden auf den „Ja“-Button.

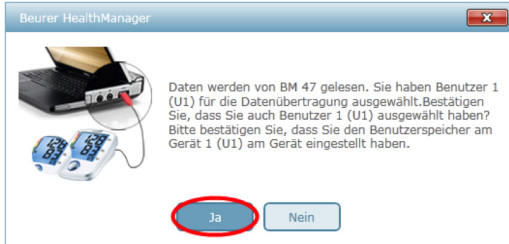


10

Warten Sie bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.



11

Um die Datenübertragung erfolgreich abzuschließen, klicken Sie auf den „Ok“-Button.

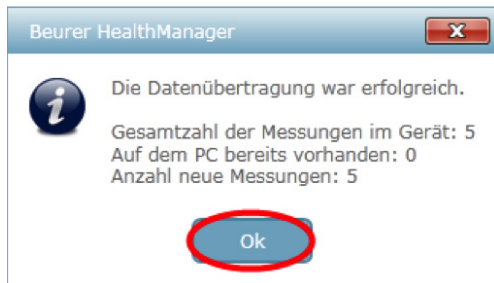

12

Um die übertragenen Messungen auf Ihrem Computer zu speichern, drücken Sie auf den „Speichern“-Button. Die Daten werden nun in der Software „Beurer Health-Manager“ gespeichert.

