

„beurer CardioExpert“ App

Die präzise EKG-Messung zuhause – mit unseren Produkten ME 90, BM 95 und der kostenlosen „beurer CardioExpert“ App haben Sie alle Ihre Werte unter Kontrolle für einen professionellen Austausch mit Ihrem Arzt.



Systemvoraussetzungen:
iOS ab 8.0, Android™ ab 4.4
Bluetooth® ab 4.0



Bequem zu Hause: EKG-Kompetenzzentrum



ME 90

BM 95

BM 95 Bluetooth® Blutdruckmessgerät mit EKG-Funktion

- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
- 1-Kanal EKG zur Aufzeichnung des Herzrhythmus
- Optimale Kontrolle des Blutdrucks und Herzrhythmus via App + Software
- Bluetooth® zur Übertragung der Messdaten an Ihr Smartphone
- Erweiterte Arrhythmieerkennung (u.a. Vorhofflimmern und Extrasystolen)
- Sofortige Kurzinformation über Herzrhythmus nach Beendigung der Aufzeichnung
- 2 x 60 Speicherplätze
- Universalmanschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm
- Zuverlässige Messergebnisse ausgezeichnet von der European Society of Hypertension (ESH)



2-in-1 Blutdruckmessgerät mit EKG-Funktion

Bluetooth® + USB

Die einfachste Art, Ihre Daten auf Ihren PC zu übertragen.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ME 90 Bluetooth® Mobiles EKG-Gerät

- Aufzeichnung des Herzrhythmus
- Selbstkontrolle der Herzfunktion zu Hause oder unterwegs
- Bluetooth® zur Übertragung der Messdaten an Ihr Smartphone
- Aufzeichnungsdauer: 30 Sekunden
- Sofortige Information über den Herzrhythmus nach Beendigung der Aufzeichnung
- 36 Speicherplätze



Mit dem mobilen EKG-Gerät den Herzrhythmus immer im Blick

PC-Software und App

Einfache und detaillierte Darstellung und Auswertung zur Selbstkontrolle und für Ihren Arzt.




Beurer GmbH, Postfach 1427, 89004 Ulm, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany
Tel. +49 731/39 89-0. Fax. +49 731/39 89-139. vertrieb@beurer.de www.beurer.com

beurer medical

Beurer CardioExpert System

Herzgesundheit
zu Hause und unter-
wegs im Blick

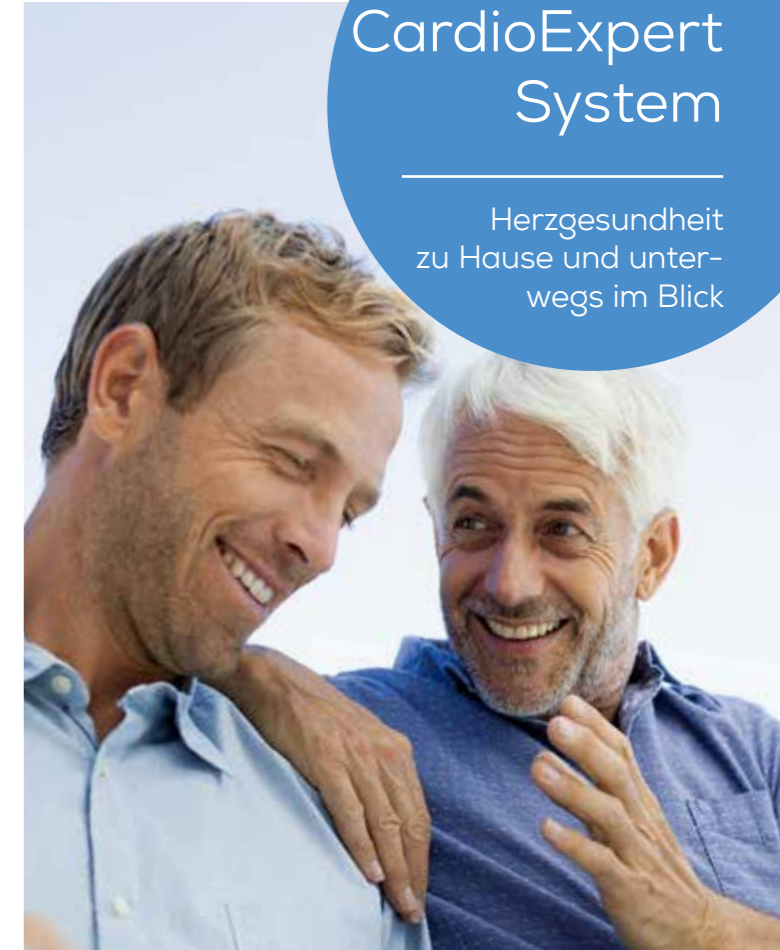

german
engineering



757.378...0718 Irrtum und Änderungen vorbehalten. Smartphones, Tablets und Laptops sind nicht im Lieferumfang enthalten

Mit den Beurer EKG-Geräten den Herzrhythmus immer im Blick

Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufs sind von sehr hoher Häufigkeit. Im Elektrokardiogramm (EKG) sind bei der Mehrzahl von Herzerkrankungen Veränderungen sichtbar, die die Geräte ME 90 und BM 95 erkennen.

Zudem typischen, frühzeitigen Merkmalen von Herzerkrankungen gehören Herzrhythmusstörungen. Diese werden bei Vorhandensein im EKG durch ME 90 und BM 95 sicher erkannt.



Herzrhythmusstörungen können vielfältige medizinische Ursachen haben.

Organische Ursachen

Kardiale Ursachen

- Herzmuskelerkrankungen
- Nichtinfektiöse (Erweiterung/Verdickung des Herzmuskels); Infektiöse: Kardiomyositis (Virus im Muskel)
- Koronare Ursachen (Herzkranzgefäß-Verengung in Folge von Bluthochdruck oder zu hohem Cholesterin)
- Herzklappenerkrankungen (Aortenstenose, Mitralklappenstenose)

Extra-kardiale Ursachen

- Arterieller Bluthochdruck
- Fieber
- Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose)
- Atemwegserkrankungen mit folgender Sauerstoffarmut
- Alter

Extra-Organische Ursachen

Medikamente

- Antihypertensiva (z.B. β -Blocker)
- Antidepressiva
- Medikamente zur Asthmabehandlung und eine Vielzahl weiterer Medikamente


Lebensstil

- Stress
- Schlafmangel
- Genussmittel (Alkohol, Coffein)

Die genannten Ursachen betreffen einen hohen Anteil der Bevölkerung. Mit den beiden Geräten ME 90 und BM 95 kann eine EKG-Aufzeichnung jederzeit und überall durchgeführt werden. Dies ermöglicht die frühzeitige Erkennung von EKG-Veränderungen und damit ein rechtzeitiges Ergreifen von präventiven Maßnahmen z.B. im Rahmen eines Arztbesuchs.

Kann ich überhaupt alleine ein EKG messen?

Dank der einfachen Handhabung des ME 90 und BM 95 können Sie ohne Vorkenntnisse eine EKG-Aufzeichnung vornehmen. Der Herzrhythmus wird 30 Sekunden lang aufgezeichnet. Ein integrierter Speicher bietet Platz für 36 Werte beim ME 90, BM 95 verfügt daneben über 2 x 60 Speicherplätze. Das Messergebnis ist selbsterklärend und in Form eines Ausdrucks für die nachfolgende Interpretation durch den Arzt aufbereitet. Verschiedene Messmethoden ermöglichen eine Anpassung an Ihre persönlichen Messpräferenzen oder an die Vorgaben Ihres Arztes.

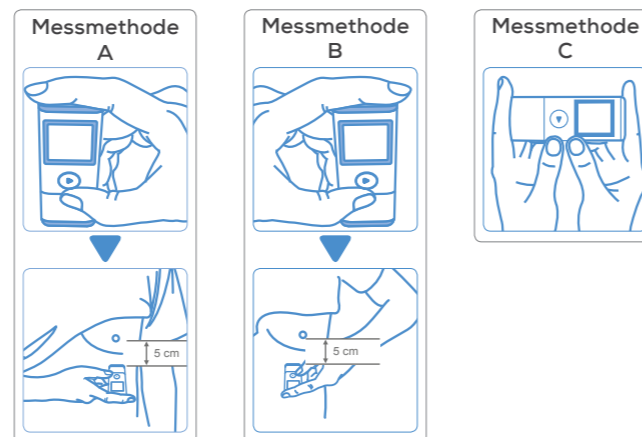

Wie kann ich als Laie ein EKG beurteilen?

Die grundsätzliche Aufzeichnung und Bewertung führen die beiden Geräte selbstständig durch. Das ME 90 und das BM 95 beurteilen dabei automatisch, ob der EKG-Rhythmus zu schnell, zu langsam, unregelmäßig, mit Pausen verbunden oder normal ist. Sie erhalten dazu auf der Anzeige sofort nach der Messung ein verständliches Symbol.



Mit dem praktischen CardioExpert als App oder PC-Software können die Aufzeichnungsergebnisse grafisch dargestellt und zur Vorlage für Ihren Arzt ausgedruckt werden.

Diese arztgerechte Dokumentation des Patientenbefunds erlaubt dem Arzt eine rasche, direkte, eigene und erweiterte Diagnose.

Die perfekte Selbstkontrolle für zu Hause oder unterwegs mit den mobilen EKG-Messgeräten ME 90 und BM 95.



Frühzeitige Krankheitserkennung und Behandlung