

beurer



Insektenstichheiler BR 60

- Für die Behandlung von Insektenstichen und -bissen
- Ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit auch für Schwangere geeignet
- Kann gegen Juckreiz und Schwellung helfen
- Größe: 9,5 x 3,5 x 2 cm
- Medizinprodukt
- Inkl. Batterien
- PZN: 16389388

Kompakte Größe -
Ideal für unterwegs

Programmauswahl:

- Erstanwendung und sensible Haut (3 Sek.)
- Regelmäßige Anwendung (6 Sek.)



Keramische Heizplatte


Entdecken Sie jetzt unser gesamtes Produktsortiment unter www.beurer.com

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany.
Tel. +49 731/39 89-0, Fax. +49 731/39 89-139, vertrieb@beurer.de www.beurer.com



759.323_0221 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Keine
Chance
dem
Juckreiz

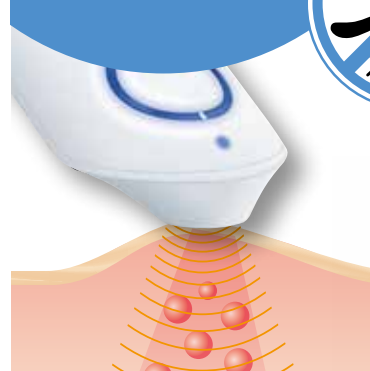

BR 60 Insektenstichheiler



german
engineering



Insektensticheiler
BR 60
Kompakt, optimal
für unterwegs



EIN INSEKTENSTICH IST LÄSTIG

Die Symptome nach einem Insektenstich hat jeder schon einmal erlebt: brennender Juckreiz bis hin zu Schwellungen.

Der Insektensticheiler BR 60 kann Abhilfe schaffen. Zur Anwendung wird die Heizfläche des Gerätes direkt auf dem Stich platziert. Durch die Wärmeentwicklung der schnell aufheizenden, keramischen Heizplatte können die Symptome schneller abklingen und der Juckreiz kann reduziert werden.



LINDERUNG VON JUCKREIZ UND SCHWELLUNG

Mit dem BR 60 Insektensticheiler können unangenehme Auswirkungen wie Juckreiz und Schwellungen gelindert werden. Der Heilungsverlauf wird häufig als angenehmer empfunden.

KINDERLEICHTE ANWENDUNG

Eine Anwendung unmittelbar nach dem Insektenstich oder -biss bringt die besten Erfolge. Dem Nutzer stehen zwei Programme mit unterschiedlicher Anwendungsdauer zur Auswahl: Ein Programm ist für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut geeignet, ein zweites Programm wird bei einer regelmäßigen Nutzung empfohlen.

Die punktgenaue Wärme kann den Juckreiz verdrängen und den Heilungsprozess fördern. Die Anwendung verläuft ohne chemische Stoffe, sodass auch Schwangere den Insektensticheiler anwenden können.



*Keine Sorge, wenn es mal piekst!
Durch gezielten Wärmeeinsatz kann der BR 60 Abhilfe schaffen. Der durch Insektenstiche und -bisse ausgelöste Juckreiz kann reduziert und der Heilungsverlauf beschleunigt werden.*